

Prático X

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

- Não corrosivo.
- Não Tóxico.
- Biodegradável.
- Sem álcool.
- Sem odor.



**POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA
CONTRA MICROORGANISMOS RESISTENTES**

**ASSISTÊNCIA A SAÚDE
PRODUTO PRONTO USO**

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

750 ML

Prático X

NÍVEL INTERMEDIÁRIO

**PARA SUPERFÍCIES FIXAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS,
MATERIAIS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA**

SOLUÇÃO À BASE DE MISTURAS DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO COM BIGUANIDA.
DESINFETANTE HOSPITALAR COM ALTO PODER BACTERICIDA.

Vantagens

- Economiza-se um dos recursos naturais mais importantes: água.
- Amplo espectro de ação, incluindo microrganismos multirresistentes.
- Laudos REBLAS e com certificação BPL (reconhecidos pelo INMETRO e ANVISA);
- Simplifica o processo de limpeza e desinfecção.
- Agiliza a execução dos processos, ganhando-se tempo.
- Possui efeito residual, formando uma barreira de proteção.
- Limpeza e Desinfecção em um único procedimento sem enxague.
- Diminui a quantidade de produtos utilizados, gerando economia.
- Compatível com qualquer tipo de superfície, inclusive eletroeletrônicos.
- Não contém corante, essência, álcool, atóxico e não irritante.

Ação

O **Prático X** é composto por PHMB e quaternário de amônio 5ª geração que promovem a limpeza e desinfecção de superfícies fixas, artigos não críticos, artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Ideal para a limpeza e desinfecção de hospitais, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicados em pisos, paredes, mobílias e artigos não críticos.

Apresentações

Caixas de papelão com 4 galões de 5 litros

Caixas de papelão com 12 frascos de 750 ml com gatilho inteligente de dupla função: Spray/ Espuma.

Mode de Uso

1. O Prático X, já está pronto para uso e não deve ser diluído. Pode ser pulverizado diretamente sobre as superfícies com seu gatilho espumador ou pode ser aplicado com o auxílio de pano, mop ou esponja macia. Não é necessário enxaguar a superfície sanitizada com Prático-X.
2. O produto nunca deverá ser borrifado diretamente no equipamento eletrônico, devendo ser aplicado primeiramente em pano ou mop.
3. Para desinfecção de nível intermediário: lavar, enxaguar e secar os artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Imergi-los na solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Possui Eficácia Comprovada Frente aos Microrganismos:

- Mycobacterium smegmatis,
- Mycobacterium bovis,
- Trichophyton mentagrophytes,
- Candida albicans,
- Escherichia coli,
- Salmonella choleraesuis,
- Pseudomonas aeruginosa,
- Staphylococcus aureus.

Estrada Municipal Fernando Luiz Landgraf (PNG 060), 370
Pirassununga/SP - CEP: 13.634-760 - CNPJ: 09.601.610/0001-15
Tel. (11) 2950-5679 / (19) 3562-6343 - sac@cosmoderma.com.br /
www.cosmoderma.com.br



Registro no MS N°3.4628.0032
Aut. Func./M.S. 3.04628.1
Resp. Técnico: Patrícia A. Tassoni
CRF 22203 – IV Região – SP

